

FICHE PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT

PROTECTION ANATOMIQUE POUR INCONTINENCE MODÉRÉE À TRÈS LOURDE



La gamme iD Form est prévue pour les personnes souffrant d'une incontinence modérée à très lourde et est disponible en différents degrés d'absorptions. Ce produit doit toujours être porté avec le produit iD Care Net pants, un slip de fixation qui aide à maintenir la protection correctement en place. Comme alternative, des sous-vêtements personnels adaptés pourront être utilisés. Cette protection anatomique est 100% respirable et approuvé par des dermatologues. Le degré d'absorption est déterminé par un système de couleur et de gouttes qui sont mentionnés à la fois sur le produit et sur les emballages.







	Absorption	Couleur	Taille	Pièces/sac	Sacs/carton	Ref. numéro
Normal	4 gouttes		Discreet	28	4	5310155280
Plus	6 gouttes		Long	21	8	5310260210
Extra	8 gouttes		Long	21	8	5310265210
Extra Plus	10 gouttes		Long	21	8	5310270210
			Extra Long	21	4	5310370210
Super	12 gouttes		Long	21	6	5310275210
			Extra Long	21	4	5310375210
Maxi	14 gouttes		Extra Long	21	4	5310380210

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Absorption rapide & garde au sec instantanée	La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée.
	Contrôle d'odeurs	Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables.
	Protection contre les fuites	Les barrières anti-fuites intégrées hydrophobes empêchent les fuites latérales, tout en maintenant sécurité et confort.
	Sensation de coton	Un touché tissu doux procure un maximum de confort et de discrétion.
	Indicateur d'humidité double	L'indicateur d'humidité montre la saturation du produit et indique quand il doit être changé.
	Approuvé par des dermatologues	Toutes nos protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.
	100% respirable	Une enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.

TECHNIQUES D'APPLICATION

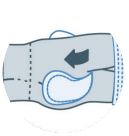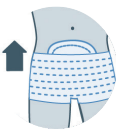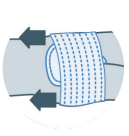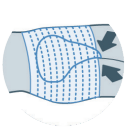

1. Commencez par tirer le slip de maintien iD Care Net Pants jusqu'à mi-cuisses, ensuite rabattre la taille du slip de maintien vers le bas pour préparer la mise en place de la protection. Pliez la protection iD Form en 2 dans le sens de la longueur, laissez vos doigts sur le non tissé et faites les bouger de part et d'autres afin de redresser les barrières anti-fuites.			1. Commencez par tourner la personne en position latérale de sécurité. Ensuite descendre le slip en le coinçant au niveau du genou replié. Pliez la protection iD Form en deux dans le sens de la longueur pour activer les barrières anti-fuites.
2. Ensuite, passez la protection entre les jambes en maintenant la gouttière. Centrez la protection en utilisant les indicateurs de miction comme guide.			2. Ensuite, passez la protection entre les jambes, de l'avant vers l'arrière en plaçant le petit côté de la protection à l'avant. Centrez la protection en utilisant les indicateurs de miction comme guide.
3. Ajustez le produit à l'avant et à l'arrière.			3. Maintenez l'avant et l'arrière de la protection en vous assurant que les barrières anti-fuites restent en place.
4. Remontez le slip de maintien iD Care Net Pants et ajustez.			4. Remontez le slip de maintien iD Care Net Pants et ajustez.